



INFORMACJA DLA PACJENTEK



LABORATOIRES ARION

Piersi to esencja kobiecości, symbol macierzyństwa i ucieleśnienie uwodzenia. Wpływają na samopoczucie i pewność siebie. Chirurgiczny zabieg rekonstrukcji, modelowania lub powiększenia piersi to ważna decyzja, która wymaga od chirurga indywidualnego podejścia i doświadczenia. Chirurg pomoże Pani, przekazując informacje i odpowiadając na wszelkie pytania.

Od samego początku jesteśmy liderem w branży implantów piersiowych, a dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu możemy wesprzeć Panią podczas tego ważnego etapu. Nasze implanty są dostępne w ponad 50 krajach na świecie, a niezwykle szeroka oferta obejmująca różne kształty, profile, objętości i powierzchnie sprawia, że w Laboratoires Arion tworzymy rozwiązania będące złotym standardem w branży. Nasze produkty są projektowane i produkowane we Francji, co pozwala zapewnić zgodność biologiczną, wyjątkowy efekt estetyczny i bezpieczeństwo.

www.laboratoires-arion.fr


PIERŚ KOBIECA

Na wygląd piersi wpływa wiele czynników, takich jak geny, budowa anatomiczna i wiek.

Pierś jest zbudowana z brodawki sutkowej i okalającej ją otoczki (obszaru o największej ilości barwnika), gruczołów mlekowych, mięśni i tkanki tłuszczowej.

Objętość piersi zmienia się przez całe życie, co wynika z wahań masy ciała podczas ciąży oraz zwiększenia lub zmniejszenia masy mięśniowej.

Natomiast jędrność piersi zmienia się wraz z wpływem grawitacji i wiekiem.

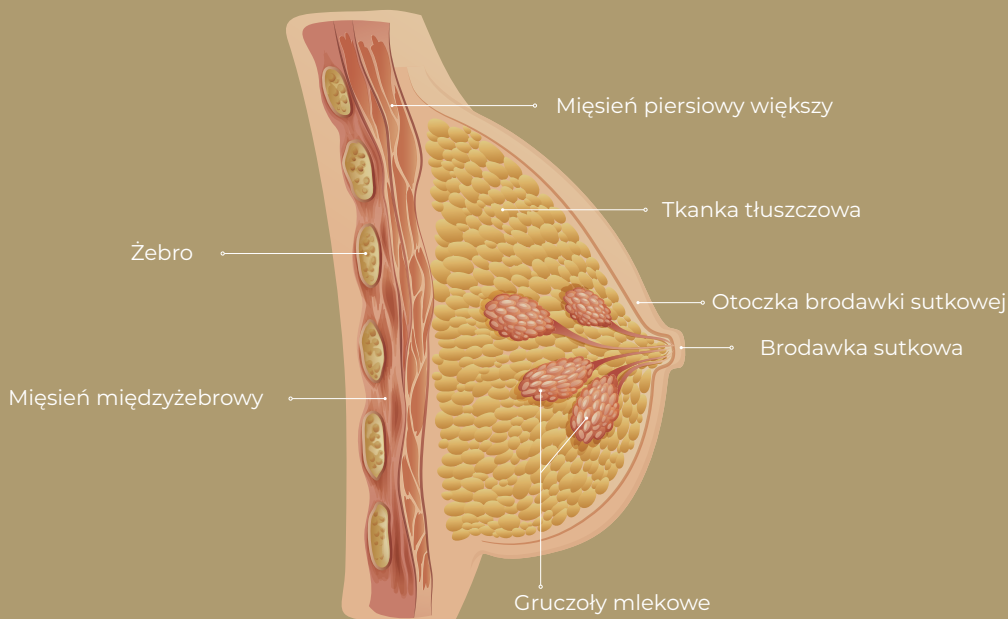

Źródło: National Cancer Institute

DLACZEGO STOSUJE SIĘ IMPLANTY PIERSIOWE?

Implanty piersiowe mogą być stosowane z różnych powodów:

- powiększenie piersi i korygowanie, w razie potrzeby, wszelkich asymetrii, oznak upływającego czasu lub wpływu ciąży. W takim przypadku mamy do czynienia z chirurgią estetyczną;
- rekonstrukcja naturalnego kształtu piersi po przebytej chorobie, w związku z wadami rozwojowymi lub wypadkiem. W takiej sytuacji mówimy o chirurgii rekonstrukcyjnej.

IMPLANT ARION MONOBLOC®

Nasze implanty są wyposażone w wyjątkową kopertę Monobloc® z automatycznie zgrzewanym krążkiem okluzyjnym zapewniającym jednolite połączenie. Implanty otoczone są powłoką zbudowaną z sześciu warstw równomiernie rozłożonego elastometru silikonowego przeznaczenia medycznego zabezpieczających przed przenikaniem żelu silikonowego do ciała pacjentki. Wypełnienie koperty w 100% naszym żelem silikonowym SoftOne® o wysokiej spoistości zapewnia idealną pamięć kształtu implantu.



KSZTAŁT

Dostępne są dwa kształty implantów pasujące do różnej budowy ciała.



IMPLANTY OKRĄGŁE


Zaokrąglona górna część i płaska podstawa;
profile: niski, wysoki, średni, bardzo wysoki
i ultrawysoki



IMPLANTY ANATOMICZNE

Kształt kropli, żel o jednej spistości lub dwóch
spistościach; kilka profili

POWIERZCHNIA

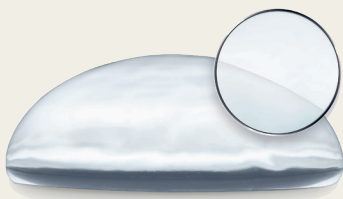

POWIERZCHNIA GŁADKA



POWIERZCHNIA MIKROTEKSTUROWANA

Powierzchnia implantu może być gładka lub mikroteksturowana.
Koperta jest następnie teksturowana, aby poprawić przyczepność do otaczających tkanek.
Wspólnie z chirurgiem wybierze Pani kształt i powierzchnię implantu najlepiej dopasowane do budowy ciała.



WSKAZÓWKA!


Objętość implantu jest mierzona w cm^3 i nie podawana jako rozmiar miseczki.

ZABIEG CHIRURGICZNY


Istnieje kilka technik wprowadzania i pozycjonowania implantu. Kwestie te należy omówić z chirurgiem i ustalić najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla własnej budowy ciała.

4


główne
podejścia

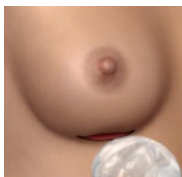


PODGRUCZOŁOWO
wzdłuż fałdu
piersiowego

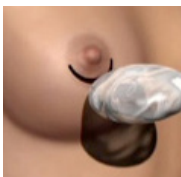

WOKÓŁ BRODAWKI
wokół brodawki
sutkowej

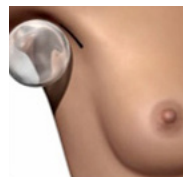


POD PACHĄ
w dole
pachowym

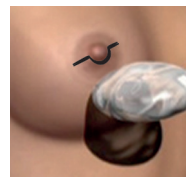


W BRODAWCE
w brodawce
sutkowej

3


możliwe miejsca
położenia
implantów

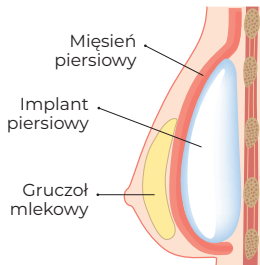

PODMIĘŚNIOWO
pod mięśniem
piersiowym

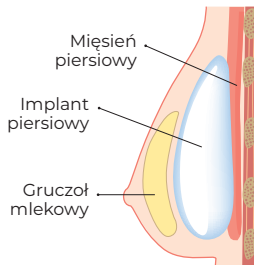

PODGRUCZOŁOWO
pod gruczołem
mlekowym

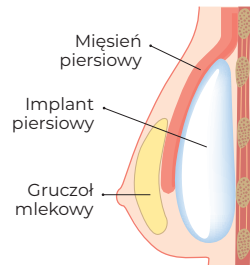

DWUPŁASZCZYNOWO
powyżej, pod mięśniem
i poniżej, pod gruczołem
mlekowym

Podczas rozmowy z chirurgiem należy również omówić:

- szczegóły operacji;
- zagrożenia związane ze znieczuleniem;
- efekty średnio- i długoterminowe;
- **rodzaj i częstotliwość wykonywania badań kontrolnych;**
- konsekwencje wykonania badań przesiewowych piersi (badanie lekarskie, mammografia);
- ewentualną interwencję w przypadku powikłań lub zmian w obrębie implantu.

Jeśli zdecyduje się Pani na operację, chirurg przekaze Pani dokument o nazwie „Formularz świadomej zgody”, który zawiera informacje omówione podczas tej rozmowy oraz informacje na temat zabiegu chirurgicznego i związanych z nim zagrożeń.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W jakim wieku można wszczepić implanty piersiowe?
Wszczepienie implantów piersiowych można rozważyć w każdym wieku, począwszy od 18 roku życia, jeśli stan zdrowia pacjentki pozwala na wykonanie zabiegu w znieczuleniu ogólnym.

Jakie zagrożenia wiążą się z wszczepieniem implantów piersiowych?

Najczęstsze zdarzenia zgłaszane przez instytucje ds. ochrony zdrowia to pęknięcie i przykurcz torebki implantu oraz – bardzo rzadko – ryzyko wystąpienia w piersi chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (ALCL). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych odczuć należy skonsultować się z chirurgiem, który wykonał zabieg.

Czy istnieje ryzyko pęknięcia implantu piersiowego podczas podróży samolotem lub w trakcie nurkowania?

Zmiany ciśnienia w powietrzu lub pod wodą nie stwarzają ryzyka pęknięcia implantów piersiowych.

ZAGROŻENIA

Pęknięcie: gdy proteza piersiowa wypełniona żelam silikonowym pęka, żel może pozostać we włóknistej kopercie, która otacza implant piersiowy, lub przez nią przeniknąć do ciała pacjentki. W tym drugim przypadku mogą pojawić się guzki zapalne. Proteza piersiowa zostanie wymieniona, a objawy stanu zapalnego ustąpią.

Przykurcz torebki: ciało pacjentki reaguje na wszczepiony implant, czyli ciało obce, tworząc rodzaj błony odizolowującej go od otoczenia. Istnieją cztery stopnie przykurczu, od niewyczuwalnej zmiany po stwardnienie, któremu niekiedy towarzyszy ból piersi.

Marszczenie skóry: po powiększeniu piersi implantami na powierzchni skóry mogą pojawić się zmarszczki przypominające fałdy.

Czy można uprawiać sport, mając implanty piersiowe?

Kwestię wznowienia odpowiedniej aktywności fizycznej należy wcześniej omówić z chirurgiem. Wznowienie aktywności fizycznej jest jednak zazwyczaj możliwe po odpowiednim okresie rekonwalescencji.

O czym muszę pamiętać po operacji piersi?

Należy zachować otrzymaną kartę pacjenta. Zawiera ona informacje na temat marki oraz parametrów implantu. Jeśli nie otrzyma Pani karty lub opisu zabiegu operacyjnego, proszę skontaktować się z chirurgiem lub placówką, w której wykonano operację.

Czy mając implanty piersiowe, można karmić dziecko piersią? Karmienie piersią nie jest przeciwwskazane po wszczepieniu implantów piersiowych.

Spowodowane są one dwoma często powiązаныmi ze sobą zjawiskami: niedostateczne wypełnienie implantu lub wiotka tkanka pokrywająca (szczupłe pacjentki).

Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek związany z implantami piersiowymi (BIA-ALCL): jest to chłoniak nieziarniczy, który może rozwinąć się w tkance bliznowatej wokół implantu. W przypadku znacznego wysięku, zwiększenia objętości, bólu, stanu zapalnego, zmian litych lub owrzodzeń w obrębie piersi zaleca się niezwłoczną konsultację z lekarzem.

Mogą pojawić się inne powikłania pooperacyjne, takie jak stan zapalny, zakażenie, ból lub krwiak. Proszę nie wahać się omówić tych kwestii z chirurgiem przed zabiegiem.

GWARANCJA ARION

Zdrowie i dobre samopoczucie pacjentek są naszym priorytetem, dlatego Laboratoires Arion oferuje dwie gwarancje na implanty piersiowe Monobloc® SoftOne® wypełnione żelem silikonowym.

+ Standardowa, 10-letnia gwarancja

Przez 10 lat od pierwszego zabiegu implant zostanie nieodpłatnie wymieniony na identyczny (pod względem profilu i objętości) w przypadku wady produktu, naruszenia struktury implantu z powodu pęknięcia koperty lub przykurczu torebki, a także w przypadku konieczności jego wymiany. Nie jest możliwa zmiana implantu na mniejszy lub większy.

+ Program gwarancyjny „Serenity” (Spokój)

Do 5 lat: jednorazowa opłata w wysokości 150 EUR netto. Program „Serenity” jest uzupełnieniem standardowego programu gwarancyjnego i obejmuje pięć lat od daty wszczęcia implantów. W przypadku reoperacji z powodu pęknięcia/ utraty integralności koperty lub wystąpienia przykurczu torebki program ten pokrywa zwrot opłat za wymianę implantu (objętość i profil muszą być takie same jak podczas pierwotnej operacji) i zapewnia 1000 EUR (brutto) na pokrycie kosztów ponownej operacji w klinice.

Ten program gwarancyjny musi zostać wcześniej zatwierdzony przez Laboratoires Arion.

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ DODATKOWE INFORMACJE O IMPLANTACH PIERSIOWYCH?

Proszę zapoznać się ze stroną internetową właściwych instytucji ds. ochrony zdrowia oraz krajowych towarzystw chirurgii plastycznej lub rekonstrukcyjnej.

LABORATOIRES ARION

Parc Haute Technologie - 694, avenue du Dr Maurice Donat 06250 Mougins - FRANCJA

Nr tel.: + **33 (0)4 92 92 39 40** - Nr faksu: +**33 (0)4 92 92 84 04** - Adres e-mail: **commercial@laboratoires-arion.fr**

www.laboratoires-arion.fr